

	<b>AKRİLİK HAZIRLAMA KABİNİ ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI</b>	<b>Doküman Kodu</b>	SH.PL.03.02
		<b>Yayın Tarihi</b>	26.12.2017
		<b>Revizyon Tarihi</b>	07.03.2022
		<b>Revizyon No</b>	01

**1.AMAÇ:** Akrilik hazırlama kabini çalıştırma ve bakım onarımının tanımlanması

**2.KAPSAM:** Bu talimat teknik servis ve cihazı kullanan personeli kapsar.

### **3.SORUMLULAR**

Teknik Servis Personeli  
Cihazı Kullanan Personel

### **4.FAALİYET AKIŞI:**

#### **4.1.CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI**

- 4.1.1.** Cihazın teknik özellikleri; 5000 m<sup>3</sup> e kadar ayarlanabilen kademeli, kullanım gücü 300 watt, 220-240 volt kabin iç genişliği 75\*120\*65 cm (+-) 10 cm yerine göre üretilir ve baca çıkışı ikili ve tekli 25 cm
- 4.1.2.** Cihazın açılması için açma kapama düğmesi çevrilir.
- 4.1.3.** Kabin içi ışıkları açılır.
- 4.1.4.** Dijital ekranda çalışma süreleri, hava debisi, arıza kodları, ortam ve çalışma ortamı ısıları görülmektedir. Kullanılacak program düğmesine basılarak seçilir.
- 4.1.5.** Işık, fan hız kademe modları ön panelden kontrol edilir.
- 4.1.6.** Çalışma bittiğinde ışıklar ve cihaz açma kapama düğmesi ile kapatılır.

#### **4.2 CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI**

- 4.2.1** Teknik servis sorumlusu yıllık bakım ve kalibrasyon planına göre cihazın bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 4.2.2** Cihazı kullanan personel cihazlarda arıza olduğunda Arıza Bildirim Formunu doldurur ve teknik servis görevlisine arıza bildiriminde bulunur ve cihazın üzerine “ **KULLANIM DIŞI EKİPMAN**” etiketi asılır.
- 4.2.3** Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza teknik servis tarafından giderilemeyecekse yetkili firma veya satıcı firma ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

### **İLGİLİ DÖKÜMANLAR**

Arıza Bildirim Formu

Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Planı

Kullanım Dışı Ekipman Etiketleri