

	AKRİLİK PIŞİRME FIRINI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman Kodu	SH.PL.03.02
		Yayın Tarihi	26.12.2017
		Revizyon Tarihi	08.03.2022
		Revizyon No	01

1.AMAÇ: Akrilik pişirme fırını çalıştırılma ve bakım onarımının tanımlanması

2.KAPSAM: Bu talimat teknik servis ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.SORUMLULAR:

Teknik Servis Personeli
Cihazı Kullanan Personel

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

- 4.1.1. Biritlere sıkıştırılmış muflaları iç hazneye yerleştiriniz.
- 4.1.2. Cihazın üst kapağını açın ve yeteri kadar su koyunuz (Biritleri kapatacak şekilde)
- 4.1.3. Altta bulunan boşaltma vanasının kapalı olduğundan emin olunuz.
- 4.1.4. Cihazı çalıştırmak için ön panelin sağındaki şalteri (1) konumuna getirin.
- 4.1.5. Timer (zaman) ve termi(ısı) kademesini uygun kademeye ayarlayın. (60 derece-10 dk)
- 4.1.6. Thermostat ve timer düğmeleri ayarlandığı zaman üstteki lambalar yanacaktır.
- 4.1.7. Cihaz yaklaşık 60 dk içerisinde muflaları pişirecektir.
- 4.1.8. “Start” butonuna basılarak çalıştırılır.
- 4.1.9. Cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar, kompresör yeterli basınca ulaşıncaya kadar stop eder. Rezitans devreye girerek suyun istenilen derecede ısıtma işlemine tabi tutar. Su yeterli ısıya ulaştıktan sonra timerden ayarlanan süre boyunca dijital ekranda geri sayım yapılır. Bu süre boyunca basınç ve ısı sabit tutulur, geri sayım bitince su ve hava tahliye olur.
- 4.1.10. Kapalı ve soğumuş konumdaki cihazın üst kapağını dikkatlice açarak, eldiven kullanarak biritleri alınız.

4.2 CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI

- 4.2.1 Teknik servis sorumlusu yıllık bakım ve kalibrasyon planına göre cihazın bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 4.2.2 Cihazı kullanan personel cihazlarda arıza olduğunda Arıza Bildirim Formunu doldurur ve teknik servis görevlisine arıza bildiriminde bulunur ve cihazın üzerine “**KULLANIM DIŞI EKİPMAN**” etiketi asılır.
- 4.2.3 Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza teknik servis tarafından giderilemeyecekse yetkili firma veya satıcı firma ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Arıza Bildirim Formu
Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Planı
Kullanım Dışı Ekipman Etiketleri