

	ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DIŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ALÇI KESME MOTORU CİHAZI ÇALIŞTIRMA VE BAKIM ONARIM TALİMATI	Doküman Kodu	SH.PL.03.02
		Yayın Tarihi	26.12.2017
		Revizyon Tarihi	08.03.2022
		Revizyon No	01

1.AMAÇ: Alçı kesme motoru çalıştırılma ve bakım onarımının tanımlanması

2.KAPSAM: Bu talimat Teknik hizmetler ve cihazı kullanan personeli kapsar.

3.SORUMLULAR:

Teknik Servis Personeli
Cihazı Kullanan Personel

4.FAALİYET AKIŞI:

4.1.CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

- 4.1.1. Makinenin fişi takılır ve su vanası açılır.
- 4.1.2. Açma kapama düğmesinden makine çalıştırılır.
- 4.1.3. Musluk kesme motorunun dönen tasına alçı model basılarak kesme işlemini yapınız.
- 4.1.4. Alçı model alçı kesme taşına yatay olarak bastırarak düzgün bir şekilde kesilir.
- 4.1.5. Kullanım bitiminde makineyi açma kapama düğmesinden kapatılır.
- 4.1.6. Cihazın temizliği yapılır.

3.2 CİHAZIN BAKIM VE ONARIMI

- 3.2.1 Teknik servis sorumlusu yıllık bakım ve kalibrasyon planına göre cihazın bakım işlerinin yapılmasını sağlar.
- 3.2.2 Cihazı kullanan personel cihazlarda arıza olduğunda Arıza Bildirim Formunu doldurur ve teknik servis görevlisine arıza bildiriminde bulunur ve cihazın üzerine “ **KULLANIM DIŞI EKİPMAN**” etiketi asılır.
- 3.2.3 Teknik servis sorumlusu arıza tanımını yapar. Arıza teknik servis tarafından giderilemeyecekse yetkili firma veya satıcı firma ile irtibata geçer ve arızanın giderilmesini sağlar.

İLGİLİ DÖKÜMANLAR

Arıza Bildirim Formu
Tıbbi Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Planı
Kullanım Dışı Ekipman Etiketleri